



### Úvod

Děkujeme za Vaše rozhodnutí o koupi kojenecké a dětské váhy Rossmax WE300. Prosíme, prostudujte pečlivě tento návod před prvním použitím a uchovejte ho pro pozdější nahlédnutí.

### Bezpečnostní instrukce

Pečlivě si přečtěte a dodržujte uvedené bezpečnostní pokyny.

- Při používání této váhy dodržujte obecné základní bezpečnostní opatření pro všechny elektronické zařízení.
- Tento návod k obsluze uchovejte pro budoucí použití.
- Tento přístroj není vodotěsný. Nevystavujte tento výrobek dešti nebo vlhkosti, neponořujte ho do vody ani jiných kapalin.
- Váhu položte na pevný rovný povrch.

Pokud dojde ke vzniku některé z následujících situací, doporučujeme kontrolu zařízení servisním technikem:

- Zařízení bylo vystaveno vysoké vlhkosti.
- Zařízení spadlo, utrpělo náraz nebo vykazuje známky poškození.
- Nepoužívejte přístroj ve vlhké místnosti a ve vzdálenosti menší než 1,5 m od vody
- Nerozebírejte toto zařízení. Tato váha může být opravena pouze autorizovaným servisním střediskem Rossmax. Neobsahuje žádné části, které mohou být opraveny uživatelem.
- Používejte váhu pouze k určenému účelu, v souladu s návodem k obsluze.
- Vyčistěte váhu mírně vlhkým hadříkem, nebo antistatickou utěrkou. Nikdy nepoužívejte agresivní nebo abrazivní čisticí prostředky nebo rozpouštědla.

### Popis ovládacích prvků



- 1 - LCD (displej z tekutých krystalů)
- 2 - Hlavní tlačítko ON/OFF, funkce TARE
- 3 - Tlačítko funkce HOLD

### Baterie

V přístroji je nasazena baterie. Před prvním použitím odstraňte ochranný izolační proužek, který zabraňuje vybití baterie nebo nežádoucímu spuštění váhy během přepravy a cesty k zákazníkovi.

- Stiskněte dolů a zvedněte kryt prostoru baterie.
- Vložte nebo nahraďte původní baterii, používejte pouze baterii CR2032 / 3 V. Dodržte polaritu podle údajů uvnitř prostoru pro baterie. U nového přístroje odstraňte ochranný izolační proužek.
- Vložte zpět kryt baterie
- Vyměňte baterii, když přístroj delší dobu nepoužíváte.



Baterii je třeba vyměnit, pokud:

- Na displeji se objeví ikona baterie.
- Stiskem tlačítka ON / OFF / TARE se váha nezapne.

### Pozor

- Baterie je nebezpečný odpad. Nevyhazujte ji společně s domovním odpadem, ale na příslušné místo zpětného odběru.
- V přístroji nejsou žádné uživatelsky opravitelné části. Na poškození ze starých baterií se nevztahuje záruka.
- Používejte výhradně doporučený typ baterie. Vkládejte vždy jen novou baterii.

### Provedení měření

1. Stiskem tlačítka ON / OFF / TARE váhu zapnete. Na displeji se zobrazí "0,000".
2. Opatrně položte dítě na vážící plochu.
3. Během měření bliká na displeji symbol "HOLD", přestane blikat, když je měření ukončeno.

### Automatická funkce HOLD

1. Tato váha má funkci "Hold" pro zvážení neklidných dětí.
2. Automatická funkce HOLD stanoví a na displeji zobrazí přesnou hmotnost dítěte tak, aby bylo dosaženo přesné hodnoty.
3. Jakmile je váha dítěte stanovena a zobrazena na displeji, symbol "HOLD" přestane blikat a naměřená hmotnost se zobrazí po dobu 20 sekund.
4. Poté se váha automaticky vypne.

### Manuální funkce HOLD

1. Je-li dítě neklidné, nebo se pohybuje energicky, nelze jeho hmotnost zaznamenat.
2. Stiskněte tlačítko "HALT", symbol "HOLD" na 3 sekundy přestane blikat, naměřená hmotnost se zobrazí na 20 sekund.


### Funkce TARE


1. Pokud chcete pod dítě na váhu položit ručník, položte ho ještě před zapnutím váhy.
2. Jestliže chcete dovažovat a nulovat, tak zapněte váhu. Jakmile je připravena k vážení, tak položte ručník na váhu a stiskněte tlačítko ON / OFF / TARE.
3. Po stisku tlačítka ON / OFF / TARE se na displeji zobrazí symbol „TARE“ a nulová hodnota hmotnosti. (pozn. Pokud odebereme ručník z váhy, zobrazí se záporná hodnota jeho hmotnosti)
4. Váhu vynulujete dalším stiskem tlačítka ON / OFF / TARE, symbol HOLD přestane blikat.

### Přepínání měřících jednotek

Z výroby je nastavena měřící jednotka kg. V případě potřeby přepnout na jinou měřící veličinu nastavte přepínač na spodní straně přístroje (vedle krytu baterie) na požadovanou jednotku (kg / lb / oz).

### Chybová hlášení:

 Nízké napájecí napětí baterie. Vyměňte baterii.

 Přetížení váhy. Hmotnost dítěte je více než 20 kg.

### Technická data

Maximální zatížení	20 kg
Minimální zatížení	100 g
Rozlišení	5 g
Napájení	1× baterie CR2032 / 3 V
Provozní podmínky	teplota 0 – 40 °C, relativní vlhkost <80 % RH

### Záruka

Na tento přístroj se vztahuje záruka 2 roky od data nákupu. Záruka je platná pouze po předložení vyplněného záručního listu nebo jiného dokladu dle platné legislativy potvrzující datum prodeje. Záruka se nevztahuje na baterii. Otevření nebo jakákoliv oprava nebo úprava přístroje ruší platnost záruky. Záruka se nevztahuje na škody způsobené nehodou, mechanickým poškozením nebo používáním přístroje k jinému účelu než je uvedeno v návodu k použití. V případě poruchy nebo závady se prosím obraťte na prodejce nebo distributora.



### Legislativa

Elektronické přístroje nutno likvidovat v souladu s místními platnými předpisy, nikoliv s domácím odpadem. Zařízení, které již nepotřebujete, vraťte do sběrných nádob s elektroodpadem, do sběrných dvorů apod. Nepatří do popelnic s domácím směsným odpadem!



Používání tohoto přístroje nelze považovat jako náhradu za konzultaci s vaším lékařem.

### Distributor

BONECO CR, s.r.o., Na Podhoře 185, 588 13 Polná  
Tel: 774 162 396, e-mail: info@boneco-cr.cz,  
www.boneco-cr.cz