

LANAFORM®

Relax Mass

Massager cushion



In-depth shiatsu
massage

Massage shiatsu
en profondeur

Diepgaande
shiatsu massage

ÚVOD

Děkujeme vám za zakoupení vysoce kvalitního masážního přístroje „RELAX MASS“ od společnosti LANAFORM®.

„RELAX MASS“ je masážní poduška se dvěma masážními hlavicemi, které zbavují svalového napětí, zklidňují bolesti svalů a snižují svalovou únavu. „RELAX MASS“ je pohodlný a zdokonalený masážní přístroj, který rovněž provádí velmi příjemnou masáž „shiatsu“. Součástí přístroje je vibrační funkce, kterou oceníte při sezení na židli nebo na sedačce, a předváděcí funkce „demo“ pro předvedení plynulé sekvence jednotlivých možností masáže. Přístroj je možno snadno ovládat pomocí přehledného dálkového ovladače, který se díky svému ergonomickému tvaru dokonale přizpůsobí každé ruce. Přístroj „RELAX MASS“ je možno používat v kanceláři, doma i jinde.

PŘED PRVNÍM POUŽITÍM ZAŘÍZENÍ „RELAX MASS“ SI NEJPRVE PEČLIVĚ PROSTUDUJTE NÁVOD K POUŽITÍ, ZVLÁŠTĚ PAK NIŽE UVEDENÉ BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY:

- Toto zařízení používejte pouze k účelům, pro něž je určeno, viz návod k použití.
- Tento přístroj není určený pro osoby se sníženými fyzickými, smyslovými či mentálními schopnostmi (včetně dětí) a rovněž není určený pro osoby, které se neseznámily s tímto zařízením nebo nemají zkušenosti s jeho používáním. Výjimkou jsou případy, kdy tyto osoby byly poučeny o používání tohoto přístroje osobou, která odpovídá za jejich bezpečnost či nad nimi vykonává dohled. Doporučujeme dohlížet na děti, aby si s přístrojem nehrály.
- Používejte výhradně příslušenství a doplňky dodané s tímto zařízením či doplňky a příslušenství doporučené společností LANAFORM®.
- V případě poškození napájecího kabelu jednotky je nutno ho nahradit stejným nebo podobným kabelem, který můžete zakoupit u dodavatele nebo v servisní provozovně.
- Zařízení nesmí být používáno v případě, je-li je poškozen napájecí kabel, pokud zařízení správně nefunguje, upadlo na zem nebo je poškozené, či pokud spadlo do vody. V takovém případě nechejte zařízení zkontrolovat a případně opravit u svého dodavatele či v záručním servisu.
- Přístroj zásadně nepřeházejte zavěšený za přívodní kabel a přívodní kabel nepoužívejte jako držadlo.
- S tímto zařízením zásadně nepoužívejte připínáčky ani jiné podobné kovové předměty.
- Po každém použití a před každým čištěním odpojte přístroj z elektrické sítě.
- Zařízení, které spadlo do vody, ihned odpojte z elektrické sítě a teprve potom je vyndejte z vody.
- Zapojená elektrická zařízení nesmí nikdy zůstat bez dozoru. Jestliže zařízení nepoužíváte, odpojte je z elektrické sítě.
- Napájecí kabel nesmí být umístěn v blízkosti zdrojů tepla.
- Toto zařízení nepoužívejte před spaním. Masáž má stimulační účinek, což může způsobit oddálení spánku.
- Toto masážní zařízení zásadně nepoužívejte během spánku.
- Zabráňte pádu předmětů na zařízení a do otvorů v zařízení nezasunujte žádné předměty.
- Tento přístroj zásadně nepoužívejte v místnosti, kde se používají aerosolové výrobky (spreje), či v místnosti, kde se podává nebo skladuje kyslík.
- Toto zařízení nepoužívejte pod pokrývkou ani pod polštářem. Nahromaděné teplo by mohlo způsobit požár, úraz elektrickým proudem nebo jiné zranění.
- Před odpojením přístroje z elektrické zásuvky zkontrolujte, zda je tlačítko „On/Off“ v poloze „Off“ (Vypnuto).
- Máte-li zdravotní problémy, obraťte se před použitím tohoto přístroje na svého ošetřujícího lékaře.
- Jestliže během používání zařízení ucítíte jakoukoliv bolest, okamžitě používání přerušete a obraťte se na svého lékaře.
- Tento přístroj nepoužívejte nepřetržitě déle než 15 minut.
- Tento přístroj zásadně nepoužívejte pro masírování části těla, která je oteklá, zanícená či zasažená kožní vyrážkou.
- Tento výrobek je neprofesionální masážní přístroj pro snížení svalové únavy. Tento přístroj nepoužívejte jako náhradu lékařské péče. Přístroj je určený výhradně pro domácí použití.

NÁVOD K POUŽITÍ

1) Technická specifikace:


- 2 masážní hlavice
- Masáž „shiatsu“
- 3 masážní zóny (horní část zad/spodní část zad/celá záda)
- 1 předváděcí funkce „demo“
- Vibrační poduška

2) Popis zařízení „RELAX MASS“:

Systém upínacích popruhů:

Součástí výbavy masážního přístroje „RELAX MASS“ je systém upínacích popruhů, které umožní jeho upevnění na jakémkoliv židli či sedáku. Upínací popruhy natáhněte na obě strany opěráku, spojte je a upevněte pomocí zakončení na suchý zip.

Ovládací prvky ovladače:

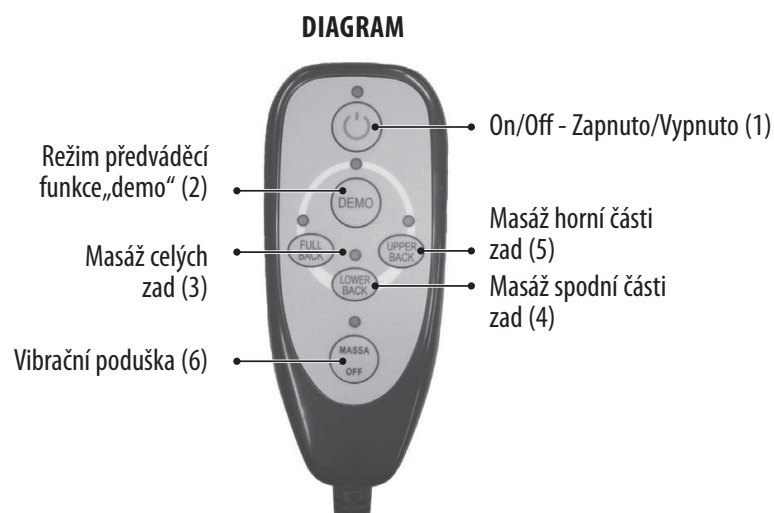

3) Použití zařízení „RELAX MASS“:

„RELAX MASS“ se používá v kombinaci s adaptérem. Nejprve zapojte koncovku napájecího kabelu do zásuvného konektoru (samice) na pravé straně masážní podušky. Potom adaptér zapojte do elektrické zásuvky. Po zapojení do zásuvky elektrického napájení je přístroj „RELAX MASS“ připravený k použití.

- On/Off (Zapnuto/Vypnuto)
Zapínání a vypínání přístroje se ovládá stisknutím červeného tlačítka (viz schéma, bod 1).

Opěra:

- Předváděcí režim „demo“ (viz schéma, bod 2)
Tento režim slouží k předvedení posloupnosti jednotlivých typů masáží. Tato funkce je zajímavá v případě, že požadujete různé typy masáže.
- Režim manuálního ovládání
Máte možnost nastavení lokální masáže nebo masáže celých zad v závislosti na tom, jakou partii chcete masírovat.
 - Masáž celých zad (viz schéma, bod 3).

- Masáž spodní části zad (viz schéma, bod 4).
- Masáž horní části zad (viz schéma, bod 5).

Masážní vibrační poduška:

Součástí výbavy přístroje je masážní vibrační poduška, kterou můžete zapnout či vypnout dle potřeby či přání (viz schéma, bod 6)

ÚDRŽBA

SKLADOVÁNÍ

- Přístroj „RELAX MASS“ uložte do krabice, v níž byl dodán, nebo na suché místo.
- Ujistěte se, zda zařízení není v kontaktu ostrými hranami či špičatými předměty, které by mohly způsobit poškození textilního povrchu zařízení.
- Aby nedošlo k porušení napájecího kabelu, neomotávejte jej kolem masážního polštáře.
- Masážní podušku nezavěšujte za kabel ručního ovladače nebo za napájecí kabel.

ČIŠTĚNÍ

- Před čištěním odpojte masážní podušku z elektrické sítě a několik minut vyčkejte.
- Čištění se provádí pomocí jemné, mírně navlhčené houbičky.
- Dbejte na to, aby se poduška nedostala do kontaktu s vodou či s jakoukoliv jinou kapalinou.
- Při čištění nenamáčejte zařízení do kapaliny.
- Při čištění zásadně nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky, kartáče ani ředidla.

RADY Z OBLASTI LIKVIDACE ODPADŮ

- Celé balení je tvořeno materiály bez nebezpečných dopadů na životní prostředí, které tedy lze ukládat ve střediscích pro třídění odpadu za účelem následného druhotného využití. Papírový obal lze vyhodit do kontejnerů k tomu určených. Ostatní obalové materiály musí být předány do recyklačního střediska.
- V případě nezájmu o další používání tohoto zařízení je zlikvidujte způsobem ohleduplným k životnímu prostředí a v souladu s platnou právní úpravou.

OMEZENÁ ZÁRUKA

Společnost LANAFORM® se zaručuje, že tento výrobek je bez jakékoliv vady materiálu či zpracování, a to od data prodeje po dobu dvou let, s výjimkou níže uvedených specifikací.

Záruka společnosti LANAFORM® se nevztahuje na škody způsobené běžným používáním tohoto výrobku. Mimo jiné se záruka v rámci tohoto výroku společnosti LANAFORM® nevztahuje na škody způsobené chybným nebo nevhodným používáním či jakýmkoliv špatným užíváním, nehodou, připojením nedovolených doplňků, změnou provedenou na výrobku či jiným zásahem jakékoliv povahy, na který nemá společnost LANAFORM® vliv.

Společnost LANAFORM® nenes odpovědnost za jakoukoliv škodu na doplňcích, ani za následné či speciální škody.

Veškeré záruky vztahující se na způsobilost výrobku jsou omezeny na období dvou let od prvního zakoupení pod podmínkou, že při reklamaci musí být předložen doklad o zakoupení tohoto zboží.

Po přijetí zboží k reklamaci, společnost LANAFORM® v závislosti na situaci toto zařízení opraví či nahradí a následně vám ho odešle zpět. Záruku lze uplatňovat výhradně prostřednictvím Servisního střediska společnosti LANAFORM®. Jakákoliv údržba tohoto zařízení, která by byla svěřena jiné osobě než pracovníkům Servisního střediska společnosti LANAFORM®, ruší platnost záruky.