



KOMPRESOROVÝ INHALÁTOR

MODEL TURBO PRO

Návod k obsluze



dr-frei.com
boneco-cr.cz

Vážený uživateli inhalátoru Dr.Frei®

Děkujeme, že jste si vybrali kompresorový inhalátor Turbo Pro. Při správném používání a péči vám poskytne dlouhodobě spolehlivou službu. Inhalátor pracuje rychle, bezpečně a pohodlně, proto je vhodný na používání pro všechny věkové kategorie. Dříve, než začnete inhalátor používat, přečtěte si důkladně tento návod na použití. Inhalátor by měl být používán pod dohledem lékaře nebo respiračního terapeuta. Spolu se svým doktorem nebo respiračním terapeutem můžete mít dobrý pocit, že jste dostali nejefektivnější inhalační léčbu na vaše respirační onemocnění.

Poznámka: Inhalátor byl vyvinut na léčbu astma, alergií a dalších dýchacích onemocnění. Před použitím se poradte se svým lékařem nebo lékárníkem, zda jsou vaše léky vhodné a schválené na užívání pomocí inhalace. Typ, dávkování a režim užívání léku určí váš doktor nebo respirační terapeut.

Toto zařízení splňuje nařízení směrnice ES 93/42/EHS (Směrnice o zdravotnických přístrojích) a evropské normy EN 13544-1:2007 + A1:2009 Zařízení na respirační terapii - Část 1: Nebulizační systémy a jejich části.

Před použitím si přečtěte tento návod na použití a ujistěte se, že je máte stálé k dispozici.

Upozornění

Při používání inhalátoru dodržujete všeobecná bezpečnostní opatření. Toto zařízení používejte jen pro stanovený účel a užívejte léky jen pod dohledem svého doktora. Nepoužívejte přístroj na užívání anestetik nebo jako dýchací ventilátor.

Bezpečnostní upozornění:

Před použitím si přečtěte následující doporučení:

- Zabraňte styku přístroje s vodou - zabráňte tím úrazu elektrickým proudem.
- Nedotýkejte se přístroje ani napájecího kabelu mokrýma rukama.
- Nepoužívejte přístroj do žádné kapaliny.
- Nepoužívejte přístroj při kopání.
- Nedotýkejte se přístroje, pokud spadne do vody. Okamžitě jej odpojte ze sítě.
- Nepoužívejte přístroj, pokud má poškozenou jakoukoliv část, hlavně napájecí kabel nebo zástrčku, nebo pokud byl poškozený do vody nebo vodou polity. Okamžitě zašlete přístroj na kontrolu nebo případnou opravu.
- Nepoužívejte přístroj v přítomnosti hořlavých plynů, kyslíku nebo aerosolů.
- Větrací otvory udržujte volné. Přístroj mějte vždy položeny na tvrdém povrchu, aby nebyly otvory blokované.
- Když je zásobník na léky prázdný, nesnažte se přístroj používat.
- Pokud se stane cokoli mimořádného, nesnažte se přístroj používat, dokud nebude zkонтrolován a opravený.
- Nenechávejte přístroj bez dozoru, když je zapojen do sítě.
- Během užívání přístroj nepakenáňejte ani jím netrestejte.
- Po každém použití, před plněním a při čištění odpojte přístroj ze sítě.
- Používejte jen příslušenství doporučené výrobcem.
- Přístroj nerozebírejte ani se jej nepokoušejte opravit.
- Nepoužívejte přístroj v rámci anestetických dýchacích přístrojů nebo dýchacích ventilátorů.

Provozní podmínky

Doporučujeme, abyste měli přístroj pod kontrolou, pokud je užíván dětmi.

Chraňte si zrak před vystupujícím aerosolem.

Maximální množství léku je 10 ml, nádoba na léky nesmí být přeplněná.

Nepoužívejte tento přístroj během řízení auta.

V případě jakýchkoli abnormitál přestaňte přístroj používat.

Nepoužívejte přístroj, pokud je vzduchová trubka přehnuta, prasklá nebo jinak poškozená.

Pentamidine není lék schválený pro použití s tímto přístrojem.


Technologie nastavitele velikosti částic

Teknologie nastavitele velikosti částic umožňuje tvorbu aerosolu s různou velikostí částic pro efektivní léčbu horních a dolních cest dýchacích. Změna velikosti částic může být provedena uživatelem snadno, bez výměny dílů. Otočením víčka nebulizační nádoby do polohy MAX (II) bude velikost částic (MMAD) 6 µm, je určeno pro léčbu horních cest dýchacích. Otočením víčka do pozice MIN (I) pro léčbu dolních dýchacích cest bude velikost částic aerosolu 3 µm (MMAD).



Popis částí inhalátoru

1. Nosní inhaláční nástavec
2. Náustek
3. Maska pro dospělé
4. Dětská maska
5. Horní díl zásobníku léčiva
6. Spodní díl zásobníku léčiva
7. Náhradní vzduchové filtry
8. Impaktor
9. Vzduchová hadice
10. Vstup vzduchu na zásobníku léčiva

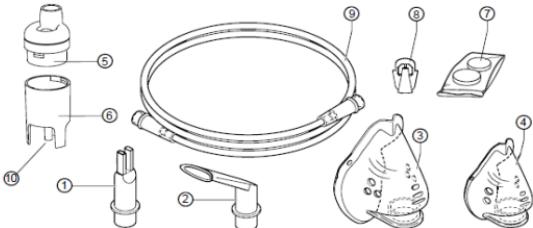

Provoz inhalátoru

1. Položte přístroj na rovný a stabilní povrch.
2. Ujistěte se, že jmenovité napětí odpovídá sítovému napájení.
3. Připojte zařízení do sítové zásuvky.
4. Otevřete zásobník léčiva otvíracím a vysunutím horní poloviny (bajonetový uzávěr, obr. A).
5. Vložte impaktor do určeného místa v zásobníku, jak je znázorněno na obrázku F.
6. Napолните léčivo do spodní části zásobníku léčiva (obr. B).
- Poznámka: Rysky uvnitř zásobníku jsou orientační.
7. Zavřete zásobník léčiva.
8. Nasadte jeden konec vzduchové hadice (9) do přívodu vzduchu na zásobníku léčiva (obr. C).
9. Nasadte druhý konec vzduchové hadice (9) výstupu vzduchu na inhalátoru (pod vikem inhalátoru).
10. Nasadte na zásobník léčiva zvolené příslušenství (masku, náustek nebo nosní nástavec, obr. D).
11. Zapněte zařízení tlacičkovým vypínačem (pod vikem inhalátoru) do polohy ON.
12. K léčbě horních cest dýchacích otočte horní díl zásobníku léčiva do polohy MAX (II), při léčbě dolních cest dýchacích do polohy MIN (I). Viz obr. E.
12. Po aplikaci vypněte zařízení a odpojte od sítě. Před opětovným uvedením přístroje se ujistěte, že se ochladil na pokojovou teplotu.

Rady pro správnou aplikaci:

- Posadte se v příjemné a vzpřímené poloze.
- Pokud je použita maska (dospělí nebo děti), ujistěte se, že příležitě k obličeji. Maska má otvory pro průdech vzduchu během výdechu. Dýchejte zhluboka, po nádechu zadržte dech.
- Pokud je použit náustek, musí být dýchaní provedeno ústy.
- Pokud je použit nosní nástavec, vložte ho jemně nosních dírek. Dýchaní musí být provedeno přes nos.
- Inhalaci ukončete, když dojde léčivo.

Použití nosní sprchy

Nosní sprcha je určena pro výplach nosních dutin. Chcete-li použít nosní sprchu, postupujte podle následujících pokynů:

1. Odsroubkujte horní část (obr. a).
2. Napолните nosní sprchu do nosní díry (obr. b).
3. Vložte impaktor (obr. c).
4. Zavřete nosní sprchu zašroubováním horního dílu zpět.
5. Připojte vzduchovou hadici (obr. d).
6. Vložte nosní sprchu do nosní díry.
7. Po použití pečlivě očistěte všechny díly.

POZOR:

Nevdechujte. Nenaklápejte nosní sprchu na více než 45 °. Nechte příslušenství po očištění dobře vyschnout, chráňte před teplem a přímým slunečním zářením.

